

# Vector® cleaner

## Специальный очиститель для системы шлангов



Vector® cleaner – это специальный очиститель для удаления растворимых в кислоте загрязнений из системы шлангов и рукоятки аппарата Vector® Paro/Vector® фирмы Dürr Dental. Vector® cleaner отличается особо интенсивным чистящим действием и очень хорошей совместимостью материалов.

Состав: Vector® cleaner содержит: неорганические кислоты (5-15 %), ПАВ (< 1 %) и вспомогательные вещества в водном растворе.

Применение: Очистку аппарата Vector® Paro/Vector® производить способом, описанным в инструкции по применению Vector® Paro/Vector®. Очистка выполняется через 50 часов работы или каждые 4 недели. Vector® cleaner применяется в неразбавленном виде. Залить около 500 мл/50 мл Vector® cleaner в водяной резервуар Vector® Paro/Vector® и выполнить очистку согласно инструкции по применению аппарата Vector® Paro/Vector®. Оставить средство в аппарате на 10 минут, макс. на 60 минут. Затем тщательно промыть шланги и рукоятку водой в соответствии с инструкцией по применению аппарата Vector® Paro/Vector®.

Внимание. Вызывает серьезное раздражение глаз. Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица. Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов.