

# FD 312

## Средство для дезинфекции поверхностей



FD 312 - это высокоэффективный, не содержащий альдегидов концентрат для одновременной дезинфекции и очистки поверхностей таких не инвазивных медицинских изделий, как: медицинские кресла, рентгеновские аппараты и т.д. а также таких моющихся поверхностей и предметов, как: полы, медицинский инвентарь, стены и т.п. FD 312 бережно действует на материалы. Приятный запах.

Состав: 100 г средства FD 312 содержат 6,5 г алкилбензилдиметиламмония хлорида, а также 5 – 15 г анионоактивных поверхностно-активных веществ, < 5 г щелочных очищающих компонентов, < 5 г комплексообразующих добавок, Гексилцин-намал, Линалоол, Бутилфенил метилпропионат, вспомогательные вещества и воду.

Спектр действия: бактерицид, левурицидно, вируцид с ограниченным действием (вирусы с оболочкой, типа Vaccinia-вирусов, вкл. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ<sup>1)</sup> а также безоболочечные вирусы типа Adeno-вирусов, Ного-вирусы). Занесен в список VАН. Проверено в соответствии с EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 16615.

1) В соответствии с рекомендацией Института Роберта Коха (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Применение: Средство FD 312 применяется в виде 1 %-ного раствора при соблюдении времени воздействия 15 минут. Для этого с помощью мерного стаканчика в крышке (отметка соответствует 20 мл) необходимо отмерить, например, 80 мл средства FD 312 и развести водой до 8 литров. Быстрая дезинфекция при помощи 2 %-ного раствора за 5 минут (см. таблицу в DE). Препарат FD 312 запрещается смешивать с бытовыми моющими средствами. Разбавить препарат в теплой воде. Мы рекомендуем использовать метод двух ведер или подобный метод влажной уборки. Поверхности мед. приборов протирать влажной тряпкой. Следить за равномерным увлажнением обрабатываемых поверхностей. Дополнительные указания - см. также информацию о продукте на нашем сайте.

Указания: Очищенная упаковка подлежит вторичной переработке.

Опасность. Вызывает серьезные повреждения глаз Вызывает раздражение кожи. Весьма токсично для водных организмов Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица. При раздражении кожи и появлении сыпи: обратиться к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.

# FD 312

## Средство для дезинфекции поверхностей

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Промыть кожу водой/принять душ. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов.

CE 0297

Dürr Dental AG  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerr.de](mailto:info@duerr.de)

2016-12

